



NDO DES FORTE



NDO DES FORTE

DES FORTE jest środkiem dezynfekcyjnym gotowym do użycia, szybko działającym, zawierającym aldehyd glutarowy.

NIE WYMAGA ODDZIELNEGO AKTYWATORA.

**WYMIANA ROZTWORU CO 100 APLIKACJI LUB RAZ NA MIESIĄC
/ W PRAKTYCE PRZY 12-16 APLIKACJACH DZIENNIE WYMIANA 1 RAZ W TYGODNIU /**

DES FORTE jest skutecznym środkiem przeciwko: B, Tbc, F, V / łącznie z HIV i HBV / S

DES FORTE zalecany jest:

- do dezynfekcji naczyń i narzędzi wykonanych z gumy i plastiku
- do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych
- do dezynfekcji elastycznych końcówek endoskopów
- do dezynfekcji sprzętu inkubacyjnego
- do dezynfekcji urządzeń protetycznych w stomatologii
- jako dezynfektant w zastępstwie sterylizacji / elastyczne końcówki endoskopów /
- jako sterylizant

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Przed dezynfekcją DF należy upewnić się, że materiały z których wykonane są narzędzia oraz naczynia są odporne na działanie aldehydu glutarowego.

Użytkownicy muszą stosować następujące środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, maski, fartuchy. Należy zapewnić dobrą wentylację i unikać wdychania oparów.

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI:

- Przetrzeć narzędzia z zabrudzeń
- Narzędzia dokładnie umyć za pomocą szczotki, a następnie dobrze wypłukać czystą wodą.
- Zamoczyć narzędzia w DES FORTE. Należy używać pojemniki z przykrywką. Należy upewnić się, że narzędzia zostały całkowicie przykryte płynem dezynfekcyjnym oraz, że wszystkie wewnętrzne kanały i zawory narzędzi są wypełnione i zanurzone w płynie.
- Po upływie wymaganego czasu kontaktu / patrz tabela / należy opłukać narzędzia czystą wodą i wysuszyć.
- Środek należy zmieniać raz w miesiącu oraz natychmiast kiedy są widoczne zabrudzenia.
- DES FORTE należy używać w zastępstwie sterylizacji tylko wówczas jeżeli użycie autoklawu, gorącego powietrza lub gazu sterylizującego jest niemożliwe / np. elastyczne końcówki endoskopów /.

	DZIAŁANIE	CZAS KONTAKTU	UWAGI !!!	CZAS OKRES WYMIANY ROZTWORU
DEZYNFEKCJA NARZĘDZI	B, Tbc, F, V	30 MINUT	WYPŁUKAĆ CZYSTĄ WODĄ, A NASTĘPNIE WYSUSZYĆ	100 DEZYNFEKCJI lub 30 DNI
DEZYNFEKCJA WYSOKIEGO STOPNIA NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO / W TYM ELASTYCZNE KOŃCÓWKI ENDOSKOPÓW /	B, Tbc, F, V, S	3 h	WYPŁUKAĆ CZYSTĄ WODĄ, A NASTĘPNIE WYSUSZYĆ / ELASTYCZNE KOŃCÓWKI ENDOSKOPÓW PŁUKAĆ PRZEZ 10 MINUT POD BIEŻĄCĄ WODĄ	100 DEZYNFEKCJI lub 30 DNI

SKŁAD DES FORTE:

Aldehyd glutarowy /1.5-Pentanedial/ 2.5%
pH 6,5

Opakowanie: 5 L kanister
Nr prod. F0020-5

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu: **3 lata**

**Nr Rejestru Wytwórców
i Wyrobów Medycznych
PL/DR 00 1410**

IMPORTER:
NorDen Sp.z o.o.
ul. Półnanki 23
30-740 Kraków Polska
tel. +48 12 658 48 70
fax +48 12 658 53 14
kom. +48 691 712 290
e-mail: norden@post.pl

PRODUCENT:
ERISAN
P.O. Box 27, 02 781 ESPOO,
FINLAND

DES FORTE zawiera aldehyd glutarowy

Szkodliwy w przypadku wdychania i spożycia. Działa drażniąco na układ oddechowy i na skórę. Niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia oczu. Może wywoływać uczulenie w wyniku wdychania i przez kontakt ze skórą. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemywać dużymi ilościami wody i zwrócić się do lekarza o poradę. Stosować w miejscach dobrze przewietrzanych.



Substancja szkodliwa: Xn