



# NDO CLEANER U



## NDO CLEANER U

## SPECJALNY ZMYWACZ DO NARZĘDZI MEDYCZNYCH

**NDO CLEANER U** jest specjalnym zmywaczem służącym do mycia narzędzi i sprzętów. Efektywnie usuwa wszelkie zabrudzenia powstałe podczas pracy. Może być stosowany na wszystkie materiały stosowane w Służbie Zdrowia.

### NDO CLEANER U jest rekomendowany do:

- myjek ultradźwiękowych
- ręcznego mycia endoskopów
- mycia endoskopów w urządzeniach automatycznych
- ręcznego mycia narzędzi i sprzętów

### INSTRUKCJA STOSOWANIA

Stosując **NDO CLEANER U** w myjce ultradźwiękowej należy zmieniać roztwór roboczy 1-2 x dziennie. W przypadku mycia zaschniętego brudu należy wcześniej myte przedmioty zamoczyć w 2% roztworze. W przypadku mycia ręcznego przygotować nowy roztwór na każde mycie. Wypłukać narzędzia czystą wodą. Wysuszyć.

### SKŁAD:

EDTA	< 5%
Triethaloamine	< 5%
Butyl Diglycol	< 5%
Anionic Surfactans	< 5%
Nonionic Surfactans	5 - 15%
Preservative	

pH roztworu użytkowego: 9

### ROZTWORY UŻYTKOWE:

	STĘŻENIE ROZTWORU ROBOCZEGO	ROZCIĘCZENIE W 1 L GOTOWEGO ROZTWORU
MYJKI ULTRADŹWIĘKOWE	1 - 2 %	10 - 20 ml / 9,9 dl CZYSTEJ WODY
AUTOMATYCZNE MYCIE ENDOSKOPÓW	1 - 2 %	10 - 20 ml / 9,9 dl CZYSTEJ WODY
MYCIE RĘCZNE	1 - 2 %	10 - 20 ml / 9,9 dl CZYSTEJ WODY

Nr produktu:  
F 0050-1 op. 1l PE  
F0050-5 op. 5l PE

Atest PZH: HB/214/02

**TRWAŁOŚĆ** : 3 lata

**Zawiera:** Etoksylogowany alkohol tłuszczowy 5 -15 %

**IMPORTER:**  
NorDen Sp.z o.o.  
ul. Półanki 23  
30-740 Kraków Polska

**PRODUCENT:**  
ERISAN  
P.O. Box 27, 02 781 ESPOO, FINLAND

Działa drażniąco na oczy .  
Przechowywać pod zamknięciem  
i chronić przed dziećmi. Unikać  
zanieczyszczenia oczu i skóry.  
Zanieczyszczone oczy przemyć  
natychmiast dużą ilością wody  
i zasięgnąć porady lekarza .  
Nosić odpowiednie rękawice  
ochronne.



Substancja drażniąca: Xi